

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le masque que vous détenez est une solution de substitution aux masques chirurgicaux et fait parti des modèles de **catégorie 1: Agrément DGA pour masque à usage des professionnels en contact avec le public**. Leur usage est destiné aux populations amenées à recevoir du public dans le cadre de leurs activités professionnelles (policiers, gendarmes, hôtesses de caisses, etc...).

Ce masque réutilisable protège des projections lors d'une toux, un éternuement ou des postillons.

Les tissus et accessoires sont fabriqués en France.

Tous les tissus utilisés sont labellisés Oeko-tex.

Le masque est lavable en machine à 60°C.


Sa durée de vie est d'au moins 20 lavages.



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Lors du port du masque, l'individu lorsqu'il inspire est protégé à 97 % en présence de particules de 3 µm et à 96 % pour des particules de 1 µm.
- Les projections de l'individu lorsqu'il expire avec ce masque sont maintenues à 97 % pour les particules de 3 µm, à 96 % pour celles de 1 µm et à 25% en cas de particules fines de 0.2 µm.
- La perméabilité à l'air du masque est de 119 L.m⁻².s⁻¹.

GABARIT & COMPOSITION

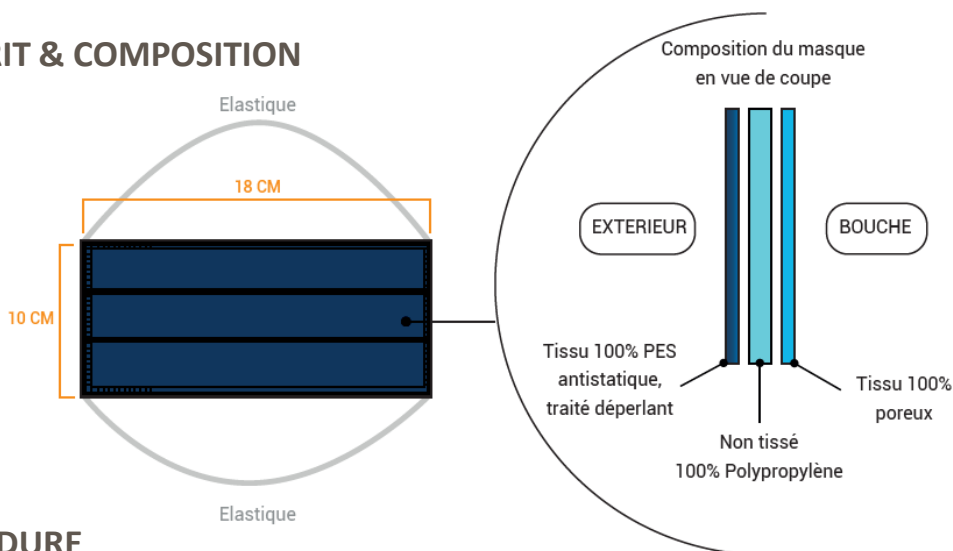

PROCEDURE



Positionnez votre masque au dessus de l'arête du nez et sous votre menton



Portez les élastiques derrière votre tête et non derrière vos oreilles



Vérifiez que vous pouvez respirer sans gêne particulière



Changez de masque tous les jours afin d'effectuer les opérations de lavage et séchage

Il est nécessaire que le masque soit bien maintenu sur votre visage. Si les élastiques de maintien mesurent plus de 23 cm, ne plus utiliser ce masque.

Le masque doit être lavé et séché tous les jours à 60°C.

REFERENCE

Référence : 319031008

CONDITIONEMENT

Lot de 50 masques

Ce masque n'est pas un dispositif médical, ceci est un masque de substitution afin de travailler en situation normale.

Le masque fourni a été lavé et séché à 60°C avant d'être emballé.

Par précaution, laver et sécher ce dernier une nouvelle fois à 60°C avant toute utilisation.