

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le masque que vous détenez est un masque civil de protection quotidien contre des projections lors d'une toux, un éternuement ou des postillons.



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Format : 3 plis
- Respiration aisée
- Protection contre la pollution
- Norme Chinoise : T/CTA 7-2019
- Testé selon méthode de la norme YY 0469-2011



	Effacité filtration à 3 µm	Respirabilité (pression différentielle)
Masque Civil Protection Quotidien	>95 %	<35 Pa / cm ²

Les essais d'efficacité filtration (selon une méthode dérivée de norme de référence) sont compatibles avec des masques chirurgicaux de type I (Efficacité de filtration bactérienne supérieure ou égale à 95 %) et la respirabilité (test réalisé selon la norme NF EN ISO 14683) donne des résultats conformes (la respirabilité doit être strictement inférieure à 40 pour des masques chirurgicaux de type I ou de type II)

La norme NF EN 14683 (2019) précise qu'il convient d'utiliser les masques à usage médical de type I uniquement pour les patients et d'autres personnes, pour réduire le risque de propagation des infections, en particulier dans un contexte d'épidémie ou de pandémie. Les masques de type I ne sont pas destinés à être utilisés par des professionnels de santé dans des blocs opératoires ou dans d'autres installations médicales aux exigences similaires.

GABARIT

- Dimensions : 175 x 95mm

PROCEDURE



Positionnez votre masque au dessus de l'arête du nez et sous votre menton



Portez les élastiques derrière vos oreilles



Vérifiez que vous pouvez respirer sans gêne particulière



Changez de masque régulièrement

REFERENCE

Référence : 319031006

CONDITIONEMENT

Boite de 50 masques



Il est nécessaire que le masque soit bien maintenu sur votre visage. Si les élastiques de maintien se détendent, ne plus utiliser ce masque.

Ce masque n'est pas un dispositif médical, ceci est un masque de substitution afin de travailler en situation normale.